

Optical ID SP. z o.o
ul. Przemysłowa 4a/ 85-758 Bydgoszcz
+48 532864940/ jakub.stawowski@opticalid.pl
NIP:5543009019/ KRS:523976740

Instrukcja korzystania z aplikacji Luxe by Optical ID

Aplikacja Luxe by Optical ID umożliwia precyzyjny pomiar rozstawu źrenic (PD) oraz odległości roboczej (WD). Dostępna jest wyłącznie na urządzenia z systemem iOS i można ją pobrać bezpośrednio z App Store.

Krok po kroku:

1. Pobierz aplikację

Zainstaluj aplikację Luxe by Optical ID na swoim iPhone, odwiedzając sklep App Store.

2. Uruchom aplikację

Po otwarciu aplikacji, zostaniesz poproszony o zmierzenie swojego rozstawu źrenic (PD) oraz odległości roboczej (WD).

3. Pomiar PD i WD


Trzymaj telefon przed twarzą, na wysokości oczu. Aplikacja automatycznie pobierze potrzebne wymiary.

4. Wskaźnik poprawności pomiaru


- Jeśli pomiar został wykonany prawidłowo, wskaźnik "WD" w lewym górnym rogu ekranu zaświeci się na zielono.
- Jeśli pomiar będzie nieprawidłowy, wskaźnik będzie czerwony, co oznacza konieczność ponownego pomiaru.

5. Wyświetlenie wyników

Po poprawnym pomiarze, aplikacja pokaże wymiary PD i WD, a także wyświetli komunikat „Luxe dla Ciebie”.

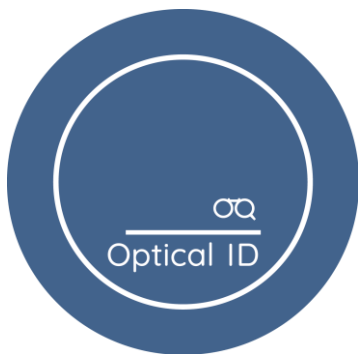

Optical ID SP. z.o.o
ul. Przemysłowa 4a/ 85-758 Bydgoszcz
+48 532864940/ jakub.stawowski@opticalid.pl
NIP:5543009019/ KRS:523976740

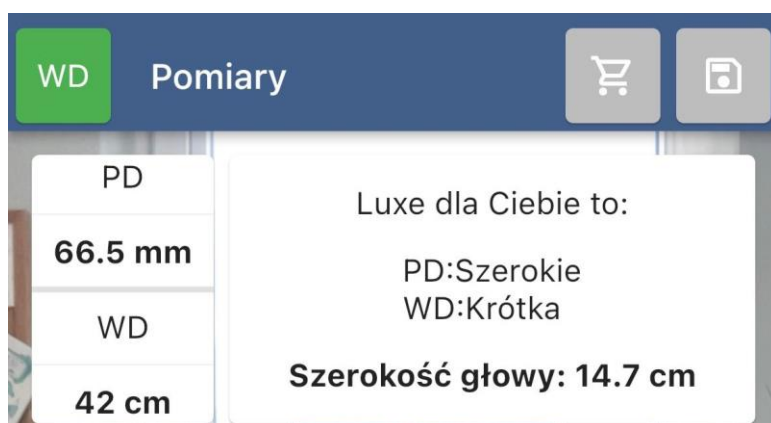

6. **Zapisz swoje pomiary**

Aby zachować pomiary, wykonaj zrzut ekranu lub kliknij na ikonę dyskiety w prawym górnym rogu ekranu.

7. **Lista pomiarów**

Pomiary zostaną zapisane w aplikacji.



Pomiary



Lista pomiarów



O Nas

8. **Prześlij wyniki**

Zapisane pomiary prześlij do nas na adres n.dabrowska@dentalid.pl